

Bonnes Pratiques d'Utilisation

Circonférences de cheville de 18 à 25 cm :



Application d'UrgoKTech :

1 ■ Appliquer **UrgoKTech** à la base des orteils en faisant deux tours d'ancrage sans étirer.

L'étalement doit se situer vers le haut de la jambe.



2 ■ Continuer en faisant une figure en "8" autour de la cheville en étirant la bande jusqu'à ce que **l'ellipse devienne un cercle**. Veillez à bien recouvrir le talon.



3 ■ Remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales avec un **recouvrement à 50%, tel que le motif de l'étalement de la spire précédente soit tout juste recouvert par la couche suivante**, et toujours en étirant jusqu'à ce que **l'ellipse devienne un cercle**.

4 ■ Finir un doigt sous le genou, couper l'excédent de bande éventuel et sécuriser avec un sparadrap.



Application d'UrgoKPress :

Appliquer **UrgoKPress** par-dessus **UrgoKTech** selon la même technique en commençant un doigt au-dessus de **UrgoKTech** et en finissant un doigt sous **UrgoKTech** afin que seul **UrgoKTech** soit en contact direct avec la peau.


Couper l'excédent de bande éventuel et appuyer doucement les mains sur **UrgoKPress** pour assurer une bonne adhérence de la bande sur elle-même et donc une bonne tenue du système.

Circonférences de cheville de 25 à 32 cm :

Suivre les mêmes instructions que celles données ci-dessus, en utilisant le Kit 25-32 cm :

Le motif d'étalement se situant au milieu de la largeur de la bande, les spirales sont effectuées avec un **recouvrement au 2/3, tel que le motif de l'étalement de la spire précédente soit tout juste recouvert par la couche suivante**, et toujours en étirant jusqu'à ce que **l'ellipse devienne un cercle**.

URGOK2 Solution innovante pour le traitement compressif des ulcères veineux et œdèmes associés

- **Pressions moyennes de 40 mmHg** recommandées par la HAS 
- **Jusqu'à 7 jours d'efficacité** sans glissement et sans renouvellement ⁽¹⁾
- **Pose sécurisée** et facile grâce au Pressure System ⁽³⁾
- **Confort des patients** avec seulement 2 bandes quelle que soit la taille de cheville* ⁽²⁾

■ **URGOK2** existe en Kits **18-25 cm** et **25-32 cm** pour s'adapter à tous vos patients

	Kit 18-25 cm	Kit 25-32 cm
UrgoKTech	10 cm x 6 m	10 cm x 7,3 m
UrgoKPress	10 cm x 7,5 m	10 cm x 10,5 m



- (1) Jünger *et al.* Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. *J Wound Care* (2009) 18(11): 474-80.
- (2) Benigni J-P *et al.* Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. *J Wound Care* (2007) 16 (9) : 385-390.
- (3) Hanna R *et al.* A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. *British Journal of Nursing* (2008) 17 (20) : S16-S24

* de 18 à 32 cm

Compression des ulcères veineux et œdèmes associés



URGOK2
L'EFFICACITÉ EN 2 BANDES
POUR UNE COMPRESSION
HAUTE PRÉCISION

Mayence - 12/09 - 506286 - 22493_URGO

NOUVEAU

URGOK2 Un système innovant pour

2 bandes dynamiques et complémentaires pour 100 % d'efficacité

1^{ère} bande UργοKTech

Bande capitonnée à allongement court

Apporte 80 % de la compression d'UργοK2

- Répartit les pressions uniformément
- Assure le confort de votre patient


2^{ème} bande UργοKPress

Bande cohésive à allongement long

Apporte 20 % de la compression d'UργοK2



UργοKTech :
Effet de massage important

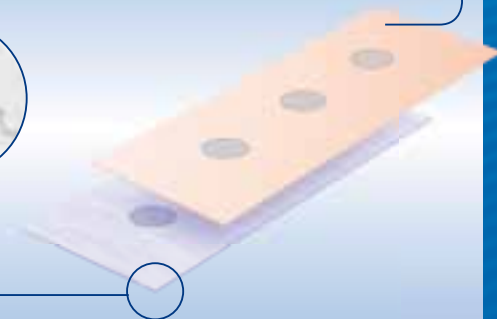

UργοKPress :
Fixe le système durablement et évite le glissement

une compression efficace jusqu'à 7 jours

La juste dose de compression quelle que soit la taille de cheville



■ 2 tailles de chevilles

> Prise en compte des variations interindividuelles



■ Etalonnage des 2 bandes :

> Visualise le degré correct d'étirement

Bande non étirée



Bande correctement étirée



> Visualise le niveau correct de recouvrement des spires (l'étalonnage est juste masqué)

18 - 25 cm



50 % de recouvrement

25 - 32 cm



2/3 de recouvrement

L'efficacité compressive multicouches en seulement 2 bandes

Une efficacité clinique démontrée dans le traitement des ulcères et des œdèmes veineux⁽²⁾

Etude clinique multicentrique portant sur 42 patients porteurs d'ulcères veineux

■ Réduction de la surface de la plaie : 58,5 % en 6 semaines



S0



S6

Pour vous : une pose sécurisée et facile⁽³⁾

■ 85 % des infirmières atteignent la pression thérapeutique requise (30-50 mmHg) dès la première application avec UργοK2

■ Le Pressure System facilite la pose pour :

97 % des infirmières

URGOK2 Une synergie d'action pour une efficacité et une sécurité garanties