

# Urgostrapping®



Bande élastique adhésive de contention de haute tolérance cutanée

## Urgostrapping®

Bande adhésive avec papier intercalaire déchirable à la main. Longueur non étirée : 2,5 mètres.  
Coloris : blanc.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE EN UCD
	Bande sous film imprimé	
1843	2,5 m x 3 cm	80
1844	2,5 m x 6 cm	40
1845	2,5 m x 8 cm	80
1847	2,5 m x 10 cm	80
1848	2,5 m x 15 cm	40
1849	2,5 m x 20 cm	40

# Urgostrapping®



## DESCRIPTION

- Bande élastique tissée enduite d'une masse adhésive élastomère sans solvant.
- Enduction et aération sur toute la surface.
- Présentation :
  - . sur protecteur papier siliciné,
  - . sur axe,
  - . sous film imprimé.
- Chaîne : 100 % coton.
- Trame : 85 % coton  
15 % viscose

## PROPRIETES

- Elasticité assurée par la surtorsion des fils de coton.
- Extensibilité en longueur  $\geq 40$  %.
- Les lisières non tissées garantissent l'absence de striction.
- Les échanges physiologiques de la peau, perspiration transpiration sont favorisés par :
  - . la présence des fibres de coton,
  - . l'aération de la masse adhésive sur toute la surface de la bande.
- La manipulation est facilitée par :
  - . le protecteur papier déchirable à la main.
- La masse adhésive est spécialement conçue pour résister à de fortes transpirations.
- Masse adhésive de haute tolérance cutanée (sauf allergie propre à un des composants de la bande). En cas d'usage statique prolongé ou de pose sur une partie sensible du corps, une interface est nécessaire entre la peau et la bande.
- Usage unique.
- Radiotransparence.

## INDICATIONS

- TRAUMATOLOGIE**
- Contention dans la prévention et le traitement des lésions traumatiques articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires.
  - Rééducation fonctionnelle pour une reprise graduelle de l'activité.
- SOIN**
- Fixation de pansements.

## CONSEILS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI :

1. Utiliser sur une peau sèche, saine et dégraissée.
2. Couper la longueur de bande désirée et décoller le papier protecteur à une extrémité, le déchirer à la main au fur et à mesure de la pose.
3. Construire la contention en appliquant une tension plus ou moins importante à la bande en fonction de l'effet recherché.
4. Consolider la contention par le recouvrement de chaque bande à une ou deux reprises, en respectant le recouvrement d'au moins la moitié de la première bande.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée.
- Éviter des tensions excessives en maintien de pansements.
- Ne jamais poser sous forte tension en circulaire.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la chaleur.

## STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.  
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

