

Urgostrips®




Sutures cutanées adhésives stériles

Urgostrips®

Sutures sous emballage individuel stérile conditionnées en boîte

CODE	PRÉSENTATION	GROUPE	
		en UCD	en boîtes/CA
1600	75 x 3 mm 5 sutures	50 sachets	90
1601	75 x 6 mm 3 sutures	50 sachets	90
1602	100 x 6 mm 10 sutures	50 sachets	36
1603	100 x 12,5 mm 6 sutures	50 sachets	36

Urgostrips®

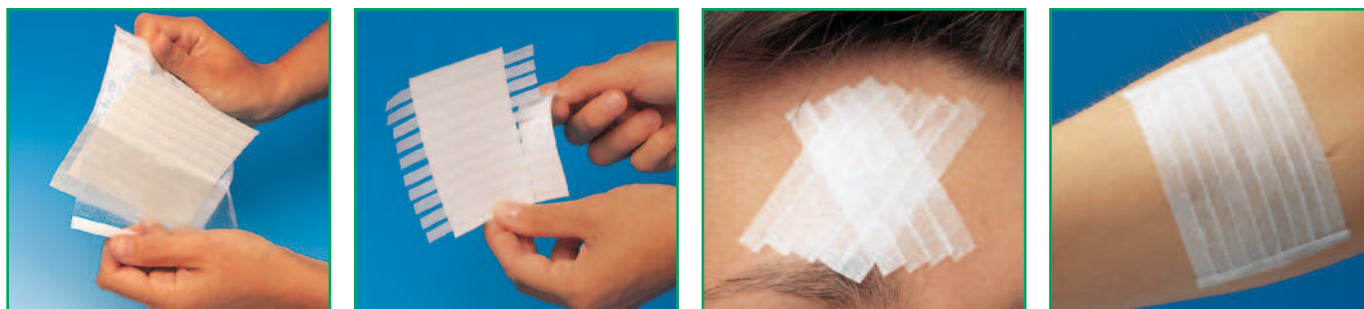

DESCRIPTION

- Bandelettes prédécoupées posées à plat sur protecteur siliconé avec prédécoupes.
- Support non tissé en fibre polyester, aéré.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Présentation sous sachet pelable, transparent sur une face.

PROPRIETES

- L'aération du support non tissé aéré évite toute macération.
- Sécurité d'emploi : . Haute résistance à la rupture obtenue sans l'adjonction de fils de renfort.
. Forte adhésivité dans le temps sans risque de glissement et respect des différents types de peaux.
- Facilité d'emploi : . Double languette de préhension pour le respect du geste aseptique.
. Sachet pelable à usage unique.

INDICATIONS

- En chirurgie réparatrice : . mammectomie,
. reprise de cicatrice en post-opératoire.
- En chirurgie dermatologique : ablation de tumeurs cutanées.
- En service d'urgences : rapprochement rapide et efficace des berges de la plaie.
- Pour renforcer les sutures par fils.

MISES EN GARDE ET CONSEILS D'UTILISATION

MISES EN GARDE :

- En cas de suspicion d'infection, contacter un médecin.
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée. (L'utilisation de produits gras type crèmes peut nuire à l'adhésivité.)

MODE D'EMPLOI :

- Après l'arrêt du saignement et les soins de la plaie,
 1. Appliquer 2 bandelettes de part et d'autre de la plaie et parallèlement à celle-ci.
 2. Appliquer une 3ème bandelette perpendiculairement : assurer d'abord son adhérence sur l'une des berges de la plaie. Exercer ensuite une légère traction afin de rapprocher l'autre berge. Appliquer sur celle-ci.
 3. Appliquer d'autres bandelettes de la même façon que la précédente de façon à recouvrir complètement la plaie.
 4. Renforcer l'ensemble en appliquant des bandelettes transversalement.Il est souhaitable de recouvrir ensuite le tout d'un pansement protecteur.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

