

Urgosyval®



Sparadrap taffetas de haute tolérance cutanée

Urgosyval®

Bobine et flasque

CODE	DIMENSIONS	GROUPÉS SOUS FILM	GROUPAGE EN UCD
1765	5 m x 1,25 cm	8	80
1746	5 m x 2 cm	6	60
1747	5 m x 2,5 cm	5	50
1748	5 m x 5 cm	3	30
1769	5 m x 7,5 cm	1	10

Urgosyval®



DESCRIPTION

- Support textile en taffetas blanc.
- Masse adhésive de haute tolérance cutanée enduite sans solvant.

PROPRIETES

- Support en acétate de cellulose se découpant sans ciseaux dans les deux sens.
- Masse adhésive dotée d'un haut pouvoir adhésif et d'une tolérance cutanée élevée.
- Aéré par perforation dans les grandes dimensions.

INDICATIONS

- Fixation de pansements non occlusifs de longue durée ou sur une peau réactive aux résines terpéniques et au latex.
- Mise en place de matériel médical sur peaux sensibles.

CONSEILS D'UTILISATION

- Éviter l'usage prolongé sur peau et/ou matériel humide (condensation). Contre-indiqué en cas de maintien de sondes en réanimation.
- Appliquer sur peau propre et sèche, non lésée.
- Surveiller régulièrement.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

