



Mars 2011

## Urgotul : une gamme adaptée à la pratique en podologie

Les plaies rencontrées au cours des soins en podologie peuvent poser des problèmes cicatriciels, par exemple chez les patients diabétiques et artéritiques, pour lesquels le spectre des complications est omniprésent. A côté de ces terrains à haut risque, les plaies du pied peuvent être bénignes mais restent souvent difficiles à panser en raison de la topographie des zones atteintes.

Urgo Medical a développé une nouvelle présentation d'Urgotul particulièrement adaptée à la podologie par la souplesse extrême de la trame de l'interface.

Des produits Urgo Medical adaptés aux plaies à risque d'infection et aux plaies chroniques sont également disponibles.

### Les plaies du pied, souvent un enjeu en cicatrisation



Le pied est une zone réputée difficile à cicatrifier car elle est soumise à des pressions mécaniques et des frictions ou des troubles de vascularisation. Avec l'âge, de nombreux sujets présentent des déformations qui peuvent entraîner l'apparition de plaies. Une simple plaie du pied, douloureuse à la marche ou à la station debout, peut conduire à une réduction des activités qui n'est jamais anodine chez le sujet âgé.

Les patients diabétiques quant à eux, risquent beaucoup plus encore puisque leurs plaies présentent un risque majeur d'infection, d'évolution vers la chronicité (maux perforants plantaires, ulcères du pied diabétique) avec le risque potentiel d'amputation dans un cas sur cinq<sup>1</sup>. Plus de la moitié des amputations d'un membre inférieur concerne un diabétique.

1. Rapport HAS. Séances de prévention des lésions des pieds chez le patient diabétique par le pédicure-podologue. Juillet 2007.




Mars 2011

## Une gamme adaptée aux plaies du pied, qu'elles soient aiguës ou chroniques

Qu'elles surviennent chez un patient à haut risque ischémique ou non, les plaies des pieds sont difficiles à prendre en charge et nécessitent des pansements adaptés, notamment en zones digitales, interdigitales et plantaires. **Urgotul**, avec sa nouvelle trame hypersouple, s'adapte à tous les creux et reliefs du pied pour une efficacité au plus près de la plaie.

Chez le patient diabétique, les plaies du pied sont propices à l'infection et lentes à cicatriser, indications pour **Urgotul Ag** (anti-bactérien) et **UrgoStart** (accélérateur de cicatrisation). Enfin, pour les plaies du talon, **Cellosorb** (pansement hydrocellulaire neutre) existe en format spécial talon, pour cicatriser et protéger grâce à son effet coussin.

Tous les pansements et interfaces Urgo Medical font appel à la **Technologie Lipido-Colloïde** qui leur assure un retrait facile et non douloureux. Tous sont remboursés au tarif LPPR.

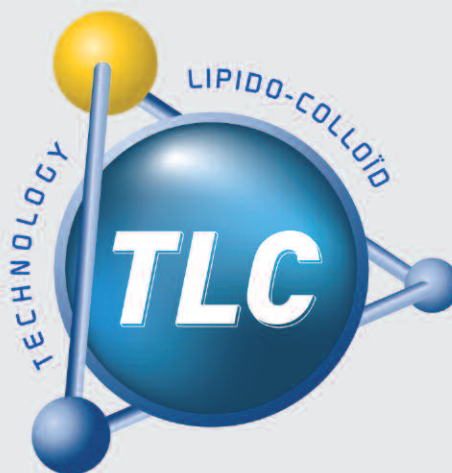

[www.URGOmedical.fr](http://www.URGOmedical.fr)