

URGOMED



Pansement pour plaies superficielles exsudatives et brûlures

Urgomed®


Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
2940	Standard : 5 x 10 cm	10	400	40
2734	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8

URGOMED



Site donneur de greffe.

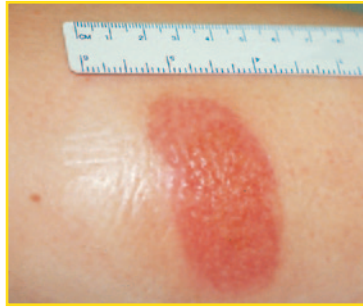

Brûlure superficielle.



Chirurgie dermatologique.

DESCRIPTION

Urgomed® est un pansement adhésif stérile, semi-perméable

COMPOSITION : **Urgomed**® est composé d'une masse dérivée de la technologie hydrocolloïde appliquée sur un support polyuréthane/non tissé.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- Au contact de la plaie, **Urgomed** forme un gel hydrocolloïde qui favorise la cicatrisation en milieu humide et permet des renouvellements indolores du pansement. **Urgomed**® est tout spécialement adapté au recouvrement des plaies superficielles exsudatives.
- **Urgomed**® est translucide et permet la surveillance de la plaie.
- **Urgomed**® est semi-perméable : la plaie, tout en continuant de respirer, est protégée des contaminants extérieurs et la poursuite des bains et des douches est possible.
- Le renouvellement d'**Urgomed**® est totalement indolore.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des brûlures du 2nd degré superficiel des dermabrasions, des sites donneurs de greffe et plus généralement des plaies superficielles exsudatives.

CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser **Urgomed**® sur des plaies infectées ou sur des brûlures profondes. Allergie connue aux hydrocolloïdes.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

■ 1 - Préparation de la plaie :

- Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles :
 - . Brûlure : désinfection à l'aide d'une solution antiseptique. Excision des phlyctènes, et rinçage au sérum physiologique.
 - . Site donneur de greffe : procéder à une hémostase immédiate du site par compresse imbibée de sérum physiologique.
 - . Dermabrasion : retirer tout caillot ou débris nécrosé, désinfecter soigneusement la plaie et rincer au sérum physiologique.

■ 2 - Application du pansement :

- Assécher la peau à l'aide d'une compresse sèche.
- Appliquer **Urgomed**® en laissant une marge de 2 à 3 cm en peau saine.
- Réaliser un pansement secondaire si nécessaire à l'aide d'une bande peu serrée (enfant, zone de frottement, mains...)
- Pour les sites donneurs de greffe : recouvrir de 1 à 2 compresses et appliquer une bande élastique moyennement serrée.

■ 3 - Suivi de renouvellement

- **Urgomed**® sera contrôlé à 48 H.
- Il sera systématiquement renouvelé en cas de brûlure, site donneur de greffe ou en cas de plaie très exsudative (saturation ou décollement de la plaque).
- Par la suite, le pansement sera renouvelé tous les 3 à 4 jours en fonction de l'exsudation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- En cas d'infection, l'utilisation d'**Urgomed**® doit être suspendue.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif LPPR = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

