

Urgopore®



Sparadrap microporeux non tissé de haute tolérance cutanée

Urgopore®

Bobine et flasque

CODE	DIMENSIONS	GROUPÉS SOUS FILM	GROUPAGE EN UCD
1785	5 m x 1,25 cm	8	80
1786	5 m x 2 cm	6	60
1787	5 m x 2,5 cm	5	50
1788	5 m x 5 cm	3	30
1795	9,14 m x 1,25 cm	8	80
1796	9,14 m x 2 cm	6	60
1797	9,14 m x 2,5 cm	5	50
1798	9,14 m x 5 cm	3	30
1799	9,14 m x 7,5 cm	1	10

Urgopore®



DESCRIPTION

- Support microporeux non tissé souple.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée.
- Transparent aux rayons X.

PROPRIETES

- Microaéré : il laisse la peau respirer et permet l'élimination des liquides d'exsudation de la plaie et de la transpiration en évitant la macération.
- Haute tolérance cutanée : il minimise les risques sur les peaux les plus sensibles.
- Indolore au décollement.

INDICATIONS

INDICATIONS :

- Tous services pour la fixation et le maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser pour la fixation et le maintien de sondes (hématologie, réanimation, couveuses)

MISES EN GARDE ET CONSEILS D'UTILISATION

- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée. (L'utilisation de produits gras type crèmes peut nuire à l'adhésivité.)
- Ne pas appliquer le sparadrap directement sur la peau lésée.
- Éviter l'usage prolongé sur du matériel humide.
- Surveiller régulièrement.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

