

UrgoCell Ag



Inscription à marque
ASR IV*

Pansement absorbant lipido-colloïde non adhésif imprégné de Sel d'Argent

UrgoCell Ag


Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
4955	Standard : 10 x 12 cm	16	128	8
4957	Grand : 15 x 20 cm	16	64	4

*Traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, œdème, plaie malodorante, exsudat abondant.



UrgoCell Ag

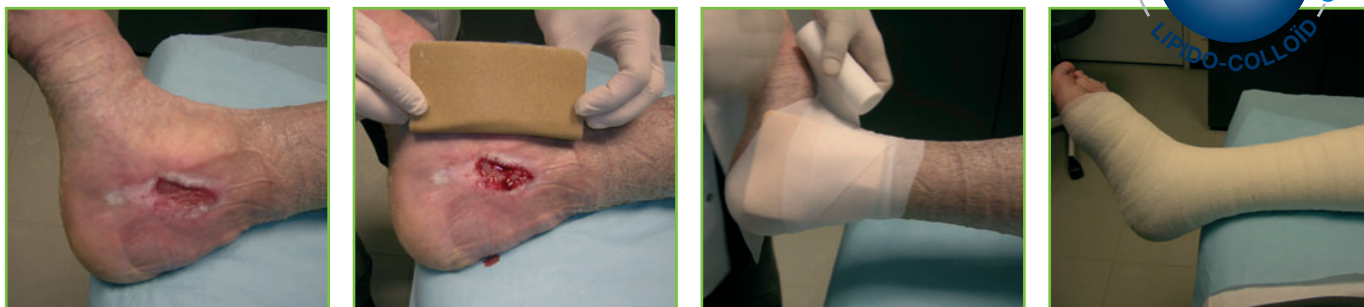

DESCRIPTION

UrgoCell Ag est un pansement absorbant imprégné de Sels d'Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires URGO.

UrgoCell Ag est un pansement absorbant non adhésif semi-perméable et découpable, constitué de 3 couches :

- au contact de la plaie, l'interface lipido-colloïde non adhérente (matrice polymérique - particules carboxyméthylcellulose et vaseline) imprégnée de Sel d'Argent,
- une compresse centrale expansée de mousse de polyuréthane absorbante non sensibilisante,
- un support protecteur en polyuréthane.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment, grâce à la matrice, un film lipido-colloïde qui crée les conditions favorables au processus **cicatriciel** (cicatrisation en milieu humide). De plus, les ions Ag contenus dans l'interface lipido-colloïde confèrent à **UrgoCell Ag** une activité antibactérienne de contact.
- La compresse de mousse de polyuréthane absorbante assure un drainage optimal des exsudats et des bactéries. Les microorganismes absorbés par la compresse sont ainsi directement tués par les ions Ag antibactériens. Cette compresse absorbante évite également tout phénomène de macération au niveau de la peau péri-lésionnelle.
- Le support est souple et conformable ; il permet une bonne adaptation du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Les renouvellements sont indolores et atraumatiques pour la plaie.
- L'utilisation sous bandage compressif est possible grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

- **UrgoCell Ag** est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives présentant un risque d'infection : des plaies chroniques (ulcères, escarres), et des plaies aiguës (brûlures du 2nd degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc).
- En raison de l'absence d'adhésif, **UrgoCell Ag** est particulièrement recommandé dans le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique.
- Application du pansement :
 - Retirer les ailettes de protection.
 - Appliquer le pansement **UrgoCell Ag** sur la plaie par son côté interface.
 - Maintenir avec une bande de fixation de type Nylex® fix.
 - Appliquer une bande de compression lorsque celle-ci est prescrite.
- Renouvellement du pansement :
 - Le renouvellement du pansement **UrgoCell Ag** se fera tous les 1 à 3 jours à saturation du pansement.
 - **UrgoCell Ag** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - Le pansement augmente de volume au cours du temps en raison de ses capacités d'absorption des exsudats.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **UrgoCell Ag** se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements locaux n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser en cas de sensibilisation connue à l'argent ou tout autre composant du pansement.
- L'utilisation du pansement **UrgoCell Ag** pendant la grossesse, l'allaitement, chez le nouveau-né ainsi que chez les prématurés n'a pas été étudiée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- Éviter le contact avec des électrodes ou des gels conducteurs, utilisés lors d'un ECG et EEG.
- Stocker le pansement **UrgoCell Ag** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C) et de la lumière.
- Ce pansement est à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas stériliser le pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'un examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM)

STATUT RELEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0086.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %*.