

UrgoTul



Interface lipido-colloïde non occlusive


Urgotul

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
8537	Petit : 5 x 5 cm	10	300	30
8538	Standard : 10 x 10 cm	10	160	16
8513	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14
8540	Large : 10 x 40 cm	10	100	10



UrgoTul

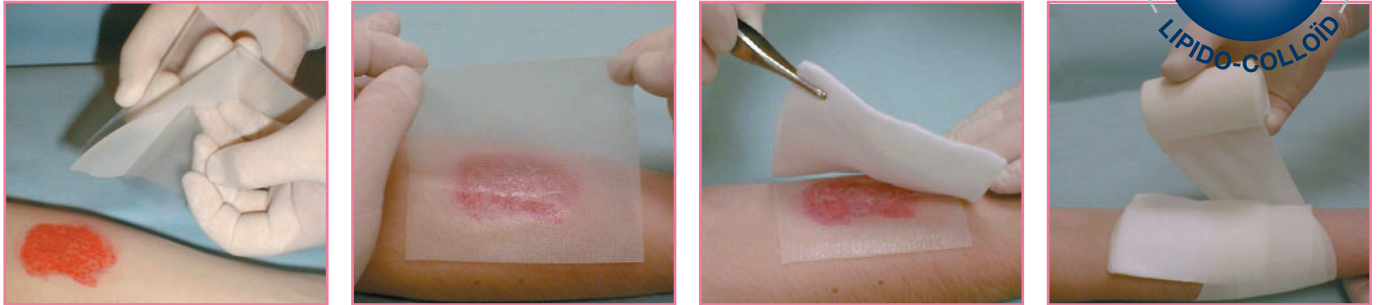

DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde non occlusive.

COMPOSITION : Urgotul est issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

Urgotul est une interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive, non adhérente à la plaie, constituée d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose) et de vaseline.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, **Urgotul** n'adhère ni à la plaie, ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Souple et très conformable, **Urgotul** épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS

- **Urgotul** est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), et des plaies chroniques (escarres, ulcères) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation, et des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale.
- Souple et très conformable, **Urgotul** est tout particulièrement indiqué dans le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles ainsi que pour le méchage des plaies creuses.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul**.
- Appliquer directement **Urgotul** sur la plaie.
- **Urgotul** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.
- Recouvrir **Urgotul** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou un filet tubulaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul** seront effectués tous les 2 à 4 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
- Dans les cas des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale, le renouvellement se fera tous les 1 à 3 jours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- **Urgotul** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul**.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, l'instauration d'un traitement préalable avec une interface anti-bactérienne de type Urgotul Ag est préconisée.
- En cas de plaie profonde, anfractueuse ou fistuleuse, laisser une partie du pansement **Urgotul** visible et accessible à l'extérieur de la plaie.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif LPPR = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

