

UrgoTul Absorb



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Absorb

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
3897	Petit : 6 x 6 cm	16	128	8
3899	Standard : 13 x 12 cm	16	128	8
3901	Grand : 15 x 20 cm	10	40	4



UrgoTul Absorb



DESCRIPTION

Urgotul Absorb est un pansement hydrocellulaire absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

Urgotul Absorb est constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie facilitant la pose, le retrait atraumatique et le repositionnement du pansement
- d'une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêts à l'emploi.

MODE DE STÉRILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

CICATRISATION :

- En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement. Il en résulte des propriétés spécifiques :
 - maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
 - gélification au contact de la plaie
 - retrait atraumatique pour les tissus néoformés
 - caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
 - respect de la peau péri-lésionnelle.
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarre, ulcère, pied du diabétique) et aiguës (brûlure du 2^{ème} degré, dermabrasion, plaie traumatique, plaie post-opératoire...), et pour le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique. En raison de son caractère non-adhésif, **Urgotul Absorb** est recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement :
 - retirer les ailettes de protection,
 - appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb** sur la plaie,
 - **Urgotul Absorb** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - maintenir le pansement avec une bande de fixation de type Nylexfix[®],
 - le pansement peut être posé sous contention, si elle est prescrite.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Absorb** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente de **Urgotul Absorb** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type Urgocell Ag.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas re-stériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

