

UrgoTul Absorb Border



Pansement absorbant lipido-colloïde
micro-adhérent adhésif

Urgotul Absorb Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
8494	Standard : 13 x 13 cm	16	128	8
8501	Grand : 15 x 20 cm	10	40	4

UrgoTul Absorb Border



DESCRIPTION

Urgotul Absorb Border est un pansement hydrocellulaire absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires URGO. **Urgotul Absorb Border** est un pansement absorbant micro-adhèrent adhésif semi-perméable constitué de 3 couches :

- au contact de la plaie, une masse lipido-colloïde microadhérente, facilitant la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement
- une compresse alvéolaire expansée de mousse de polyuréthane absorbante non sensibilisante disposée au centre du pansement
- un support protecteur en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive à haute tolérance cutanée.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STÉRILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- La compresse alvéolaire expansée de **Urgotul Absorb Border** lui confère une forte capacité d'absorption et de rétention des exsudats.
- Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment, grâce à la matrice, une interface lipido-colloïde qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- Le support est souple et confortable ; il permet une bonne adaptation du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Les renouvellements sont indolores et atraumatiques pour la plaie.
- L'utilisation sous bandage compressif est possible grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

- **Urgotul Absorb Border** est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères), aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires, ...).

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique
- Application du pansement :
 - Retirer les ailettes de protection.
 - Appliquer le pansement **Urgotul Absorb Border**, sur la plaie, la compresse centrale au regard de celle-ci.
 - Appliquer une bande de fixation si nécessaire, puis une bande de contention lorsque celle-ci est prescrite.
- Renouvellement du pansement :
 - Le renouvellement du pansement **Urgotul Absorb Border**, se fera tous les 2 à 4 jours, à saturation du pansement et pourra être plus espacé en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
 - Le pansement augmente de volume au cours du temps en raison de ses capacités d'absorption des exsudats.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type Urgocell Ag.
- Ne pas découper le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb Border** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C) et de la lumière.
- Ne pas restériliser le pansement.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

