

UrgoTul Ag



Inscription à marque*

Interface antibactérienne lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sel d'Argent

Urgotul Ag

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
7633	Standard : 10 x 12 cm	16	256	16
7627	Grand : 15 x 20 cm	16	224	14

**Traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, œdème, plaie malodorante, exsudat abondant.*

UrgoTul Ag



DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sel d'Argent.

COMPOSITION : Urgotul Ag est un pansement interface imprégné de Sel d'Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

Urgotul Ag est un pansement non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, composé d'une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sel d'argent.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- La spécificité de la TLC d'**Urgotul Ag** réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
- Les sels d'Argent d'**Urgotul Ag** libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs d'un risque d'infection locale. L'ion Argent présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
- **Urgotul Ag** a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu'à 7 jours.
- L'activité anti-bactérienne d'**Urgotul Ag** permet en outre une réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'**Urgotul Ag** n'adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Souple et très conformable, **Urgotul Ag** épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

INDICATIONS

- **Urgotul Ag** est indiqué dans le traitement local des plaies présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc...). En raison de son caractère non adhésif, **Urgotul Ag** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul Ag**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul Ag**.
- Appliquer **Urgotul Ag** directement sur la plaie.
- Recouvrir **Urgotul Ag** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou filet tubulaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul Ag** seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **Urgotul Ag** se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- **Urgotul Ag** peut adhérer aux gants chirurgicaux (latex). Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul Ag**.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements est déconseillée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- En l'absence de données cliniques spécifiques, l'utilisation d'**Urgotul Ag** pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l'aide d'appareils électroniques (EEG, ECG, etc...).
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker **Urgotul Ag** à plat, à l'abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.

CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue à l'argent et autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0086.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %*.

