

UrgoTul Ag

Lite Border



Pansement antibactérien lipido-colloïde absorbant prêt à poser

Urgotul Ag Lite Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	DIMENSIONS compresse	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
				Nombre UCD	Nombre boîtes
3257	Petit : 8 x 8 cm	4,5 x 4,5 cm	16	96	6
3258	Standard : 10 x 12 cm	5,7 x 8,2 cm	16	256	16
3260	Grand : 15 x 20 cm	8,5 x 14,7 cm	10	140	14
9577	Post-opératoire : 6,5 x 10 cm	3 x 6,2 cm	16	192	12
9579	Post-opératoire : 10 x 20 cm	5,7 x 14,7 cm	10	140	14



UrgoTul Ag

Lite Border



DESCRIPTION

■ Interface lipido-colloïde prête à poser

COMPOSITION : Urgotul AG Lite Border est un pansement absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

Urgotul® Trio est constitué de 3 couches :

- une interface lipido-colloïde non adhérente (interface TLC) au contact de la plaie pour une cicatrisation en milieu humide,
- une compresse fine disposée au centre du pansement pour absorber les exsudats et protéger la plaie, et un support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée pour des soins simples et rapides.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- L'interface lipido-colloïde non adhérente (interface TLC).
La Technologie Lipido-Colloïde (TLC) : au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'Urgotul AG Lite Border pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (Cicatrisation en milieu humide).
- La compresse fine d'Urgotul AG Lite Border disposée au centre du pansement absorbe les exsudats et protège la plaie.
- Le support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée protège et simplifie les soins. Ainsi, Urgotul AG Lite Border permet une praticité des soins et un meilleur confort pour le patient.
- La souplesse et la finesse du pansement lui confèrent une grande conformabilité adaptée aux soins des plaies de petite à moyenne surface.
- La structure aérée de la trame, ainsi que la perméabilité aux gaz de la compresse évitent les phénomènes de macération.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'Urgotul AG Lite Border n'adhère pas à la plaie : les renouvellements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.

INDICATIONS

- Urgotul AG Lite Border est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (plaies traumatiques, dermabrasions, plaies post-opératoires, brûlures...), chroniques (ulcères, escarres) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation. Recommandé pour les plaies à peau péri-lésionnelle non altérée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'Urgotul AG Lite Border.
- Bien sécher le pourtour de la plaie.
- Retirer une ailette de protection d'Urgotul AG Lite Border. Appliquer la bordure adhésive à 1 cm au moins du bord de la plaie.
- Retirer la seconde ailette et appliquer Urgotul AG Lite Border. Lisser doucement la bordure adhésive.
- Urgotul AG Lite Border peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
- Urgotul AG Lite Border ne doit pas être plié,
- Les renouvellements d'Urgotul AG Lite Border seront effectués tous les 2 à 4 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
- Urgotul AG Lite Border résiste à l'eau, et permet la douche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence de signes d'infection locale, l'instauration d'un traitement préalable avec une interface antibactérienne est préconisée.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker le pansement Urgotul AG Lite Border à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif LPPR = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

