



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Lite

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
3460	Petit : 6,5 x 10 cm	16	384	24
3476	Standard : 13 x 12 cm	16	192	12
3478	Grand : 15 x 20 cm	10	80	8
3462	Long : 10 x 20 cm	16	96	6



DESCRIPTION

Urgotul Lite est un pansement hydrocellulaire absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

La Technologie TLC consiste à assembler une compresse polyuréthane avec une matrice lipido-colloïde micro-adhérente, qui facilite la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement, grâce à ses propriétés de micro-adhérence.

Urgotul Lite est donc constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie,
- d'une compresse fine polyuréthane absorbante.
- d'un support non fissé en polyuréthane élastique.

PRÉSENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STÉRILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIÉTÉS

CICATRISATION : En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
- gélification au contact de la plaie,
- retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.

- La compresse de **Urgotul Lite** lui confère des qualités d'absorption et de rétention de faibles quantités d'exsudats.
- Le support est souple, conformable et très confortable et permet la conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement est micro-adhésif, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Lite est indiqué pour le traitement de toutes les plaies peu exsudatives, qu'elles soient chroniques (escarres, ulcères) ou aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires, ...) et dans le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association avec son traitement spécifique.

En raison de son caractère non-adhésif, **Urgotul Lite** est recommandé pour le traitement des plaies dont la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement :
 - retirer les ailettes de protection,
 - appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Lite** sur la plaie,
 - **Urgotul Lite** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - maintenir le pansement avec une bande de fixation de type Nylexfix® ou un filet tubulaire,
 - le pansement peut être posé sous compression, si elle est prescrite.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Lite** se renouvelle tous les 3 à 5 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente de **Urgotul Lite** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En raison de son caractère non occlusif, **Urgotul Lite** peut être utilisé sur une plaie infectée sous stricte surveillance médicale. Préférer un traitement préalable avec UrgoCell Ag en cas de suspicion de colonisation bactérienne.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Lite** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT RÉGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

