

UrgoTul s.Ag




Interface antibactérienne lipido-colloïde imprégnée de sulfadiazine argentique

Urgotul s.Ag

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
7701	Standard : 10 x 12 cm	10	160	16
7711	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14

UrgoTul s.Ag

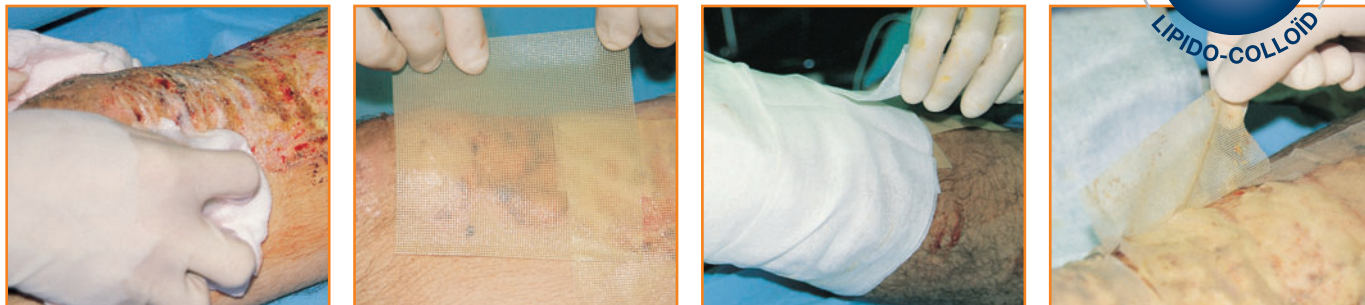

DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde imprégnée de sulfadiazine argentique.

COMPOSITION : Urgotul s.Ag est un pansement hydrocolloïde non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, constitué d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sulfadiazine argentique (0,45 mg/cm²).

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la brûlure, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'Urgotul s.Ag pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- La sulfadiazine argentique présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries gram+ et gram- et certaines moisissures et levures. Elle est particulièrement efficace sur Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Meti R, ainsi que sur Pseudomonas aeruginosa/bacille pyocyanique qui sont les germes les plus souvent responsables de la surinfection des plaies. Le pansement a démontré une activité anti-bactérienne in vitro se poursuivant pendant 7 jours.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, Urgotul s.Ag n'adhère ni à la plaie ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont indolores et atraumatiques.
- Souple et très conformable, Urgotul s.Ag épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

INDICATIONS

- Urgotul s.Ag est indiqué dans le traitement local des plaies à risque d'infection : plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques...), plaies chroniques (ulcères, escarres).

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la brûlure avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement au sérum physiologique avant l'application d'Urgotul s.Ag.
- Retirer les ailettes de protection du pansement.
- Appliquer directement Urgotul s.Ag sur la brûlure.
- Recouvrir Urgotul s.Ag d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande de type Nylex ou un sparadrap de type Urgoderm.
- Les renouvellements d'Urgotul s.Ag seront effectués toutes les 24 à 48 h en fonction de l'évolution de la brûlure traitée.
- La durée de traitement est limitée à un mois. Cependant, dans le cadre d'une brûlure superficielle traitée en ambulatoire, la non cicatrisation au-delà de 14 jours de traitement nécessite une réévaluation de la plaie en milieu spécialisé.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par Urgotul s.Ag se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- Lorsque le pansement est utilisé sur une grande surface et/ou en traitement prolongé, sur une peau lésée ou une plaie ouverte, une muqueuse, on ne peut exclure le risque d'un effet systémique lié à la sulfadiazine argentique (risque de complications générales hématoLOGIQUES, rénales, intestinales et cutanées).
- Urgotul s.Ag peut adhérer aux gants chirurgicaux. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter la prise du pansement.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements locaux n'est pas recommandée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- Eviter le contact avec des électrodes ou des gels conducteurs utilisés lors d'un EEG et ECG.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

EFFETS INDESIRABLE :

- La Sulfadiazine argentique peut générer : - Erythèmes, eczéma de contact, rares cas d'argyrie - Photosensibilisation - Leucopénies parfois sévères survenant habituellement dans les premiers jours de traitement. Le passage systémique de la sulfadiazine expose au risque de complications générales des sulfamides : hématoLOGIQUES, rénales, intestinales et cutanées (cf. précautions d'emploi).

CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue aux sulfamides et autres composants.
- L'utilisation chez les malades insuffisants rénaux ou hépatiques, les femmes enceintes ou qui allaitent, les nouveaux-nés et les prématurés est contre-indiquée en l'absence de données cliniques spécifiques.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'un examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS (Voir notice)

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

