

NOUVEAU **UrgoStart**



Inscription à marque

Pansement au TLC-NOSF inhibiteur de Protéases

UrgoStart

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
6456	Petit : 6 x 6 cm	16	128	8
6457	Standard 13 x 12 cm	16	128	8
6458	Grand 15 x 20 cm	16	32	2

www.URGOmedical.fr



UrgoStart



DESCRIPTION

Pansement matriciel composé d'une interface imprégnée de TLC-NOSF associée à une mousse absorbante.

COMPOSITION : UrgoStart est un pansement matriciel absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), non adhésif, semi-perméable, composé de 3 couches :

- une matrice lipido-colloïde constituée d'une trame polyester enduite d'une formulation polymérique, de particules de CMC, de vaséline et de NOSF,
- une compresse de mousse de polyuréthane absorbante,
- un support protecteur en polyuréthane.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

MODE D'ACTION

Au contact des exsudats de la plaie, la Technologie Lipido-Colloïde combinée au NOSF confère à la matrice, des propriétés spécifiques favorisant un processus de cicatrisation optimal.

- La TLC, grâce aux particules hydrocolloïdes, se gélifie et forme un film lipido-colloïde qui crée un milieu humide favorable au processus de cicatrisation pour que s'exerce l'action des cellules clés (fibroblastes, kératinocytes, macrophages) impliquées dans le processus de réparation.
- Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) apporte des propriétés complémentaires à la Technologie Lipido-Colloïde : au contact des exsudats de la plaie le NOSF forme un gel qui se lie préférentiellement aux zones lésées et interagit avec le micro-environnement de la plaie en limitant l'action néfaste des Métallo-Protéases Matricielles (MMP).
- La combinaison TLC-NOSF permet de rétablir les conditions favorables au bourgeonnement des plaies chroniques pour lesquelles un déséquilibre métabolique par excès de Métallo Protéases entraîne une dégradation continue de la matrice extra-cellulaire et un retard de cicatrisation.
- La compresse de mousse polyuréthane absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une bonne conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement peut être posé sous compression élastique ou inélastique grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

UrgoStart est indiqué dans le traitement des plaies chroniques exsudatives (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique...).

En raison du caractère non adhésif du pansement, UrgoStart est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel puis rincer au sérum physiologique.
- UrgoStart peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, en cas de nécessité la taille du pansement à la plaie.
- Appliquer le pansement UrgoStart sur la plaie après retrait des ailettes de protection.
- Maintenir UrgoStart en place à l'aide d'une bande de fixation type Nyllex® Fix.
- Appliquer sur le pansement une bande de compression lorsque celle-ci est prescrite.
- Renouveler UrgoStart tous les 2 à 4 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie, pour une durée de 4 à 5 semaines minimum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence d'une plaie présentant des signes de colonisation bactérienne importante, il est conseillé de traiter préalablement la composante bactérienne avant d'initialiser le traitement par UrgoStart.
- Dans le cas d'un ulcère atypique présentant une induration ou un excès de bourgeonnement localisés, le traitement par UrgoStart ne sera initialisé qu'après avoir vérifié l'absence de dégénérescence de l'ulcère afin de ne pas en retarder le diagnostic.
- Des sensations éventuelles de picotements voire de sensations douloureuses ont été rapportées principalement en début de traitement avec UrgoStart. En rapport avec l'activité du produit sur la reprise du processus cicatriciel, celles-ci ne justifient que rarement la suspension du traitement.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker le pansement UrgoStart à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C)

CONTRE INDICATIONS :

- Plaies réfractaires à la cicatrisation, au risque d'en retarder la prise en charge adaptée :
 - Plaies cancéreuses,
 - Plaies fistuleuses révélatrices d'une abcédation profonde.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %.

