

ALGOPLAQUE



Pansement hydrocolloïde stérile standard

Algoplaque®

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
2881	Standard : 10 x 10 cm	16	160	10
5845	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
5843	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

ALGOPLAQUE



DESCRIPTION

COMPOSITION :

- Pansement hydrocoloïde stérile semi-perméable.
 - La couche interne est composée de particules hydrocoloïdes (carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
 - La couche externe, imperméable à l'eau et aux bactéries, est un support semi-perméable en polyuréthane.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- Au contact de la plaie, les particules hydrocoloïdes d'**Algoplaque**® absorbent progressivement les exsudats, gonflent pour former un gel de comblement doux et humide favorable au processus cicatriciel en terme d'hydratation, de température et de pH. Ce gel non adhérent évite que le tissu cicatriciel soit endommagé lors des renouvellements de pansements.
- La grande souplesse et l'excellente adhésivité aux pourtours de la plaie permettent à **Algoplaque**® d'épouser les différentes régions anatomiques.
- La transparence de son support permet le contrôle permanent de la formation et de l'aspect du gel.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque**® sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des ulcères de jambe et des escarres au stade de bourgeonnement.

CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser en cas d'infection.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- **1 - Préparation de la plaie :**
 - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
 - Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.
- **2 - Application du pansement :**
 - Oter le film de protection.
 - Appliquer sur la plaie en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
 - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.
- **3 - Renouvellement du pansement :**
 - Au stade de bourgeonnement, sur une plaie propre, uniformément détergée, **Algoplaque**® sera renouvelé à saturation (tous les 3 à 4 jours en moyenne selon l'importance de l'exsudation).
 - Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en tirant le support parallèlement à la plaie.
 - Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.
 - Dans le cas d'une plaie très fortement exsudative, l'écoulement de substance gélatineuse autour du pansement nécessite son renouvellement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- L'utilisation d'**Algoplaque**® sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

