

ALGOPLAQUE **FILM**



Pansement hydrocolloïde stérile
extra-mince

Algo plaque® Film

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
5841	Petit : 5 x 10 cm	16	512	32
2828	Long : 5 x 20 cm	10	250	25
2832	Standard : 10 x 10 cm	16	160	10
5839	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
5837	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

ALGOPLAQUE FILM



DESCRIPTION

Pansement hydrocolloïde stérile extra-mince.

COMPOSITION :

- **Algoplaque® Film** est composé d'une masse hydrocolloïde appliquée sur un support protecteur.
 - La masse, d'une épaisseur de 350µm, est composée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
 - La couche externe est un support polyuréthane semi-perméable, imperméable à l'eau et aux bactéries.

PRESENTATION : Conditionnement individuel stérile.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- **Algoplaque® Film** forme au contact de la plaie un gel humide qui crée les conditions favorables au mécanisme cicatriciel.
- **Algoplaque® Film** est translucide autorisant la surveillance de la plaie.
- La très grande souplesse et la grande conformabilité d'**Algoplaque® Film** permettent le recouvrement de toutes les zones corporelles.
- Les pansements de la gamme **Algoplaque®** sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant le drainage des exsudats.
- Stérile

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des plaies superficielles peu exsudatives en cours de formation (ulcères et escarres superficiels, plaies traumatiques), des plaies en fin de cicatrisation (stade de réépidermisation) et des plaies chirurgicales suturées.

CONTRE-INDICATION : Ne pas utiliser **Algoplaque® Film** sur des plaies infectées.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- **1 - Préparation de la plaie :**
 - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles et sécher soigneusement le pourtour de la plaie avec une compresse stérile.
- **2 - Application du pansement :**
 - Choisir le format d'**Algoplaque® Film** de façon à laisser déborder le pansement de 2 à 3 cm en peau saine.
 - Enlever le papier protecteur et appliquer **Algoplaque® Film** sur la plaie en évitant de toucher la partie adhésive avec les doigts.
 - Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement sur son débord en peau saine.
- **3 - Renouvellement du pansement :**
 - La fréquence de renouvellement d' **Algoplaque® Film** est dictée par le type de plaie et son stade évolutif.
 - Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en étirant le support parallèlement à la plaie.
 - Dans le cadre de plaies superficielles peu exsudatives, le pansement sera renouvelé tous les 4 à 6 jours.
 - Au retrait du pansement, la plaie peut être recouverte d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement et sans douleurs par simple rinçage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- L'utilisation **Algoplaque® Film** sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- L'utilisation d'**Algoplaque® Film** sur une escarre de décubitus ne dispense pas de la poursuite du nursing habituel.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

