

Nylexfix® Lite



Bande extensible de fixation auto-adhérente

Nylexfix® Lite


Bande sous film imprimé. Coloris : blanc.
Longueur étirée : 4 mètres.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE EN UCD
9327	4 m x 4 cm	250
9328	4 m x 6 cm	150
9329	4 m x 8 cm	150
9330	4 m x 10 cm	100
9331	4 m x 12 cm	100

Longueur étirée : 20 mètres.

9332	20 m x 4 cm	60
9333	20 m x 6 cm	50
9334	20 m x 8 cm	50
9335	20 m x 10 cm	40
9336	20 m x 12 cm	40

Nylexfix® Lite

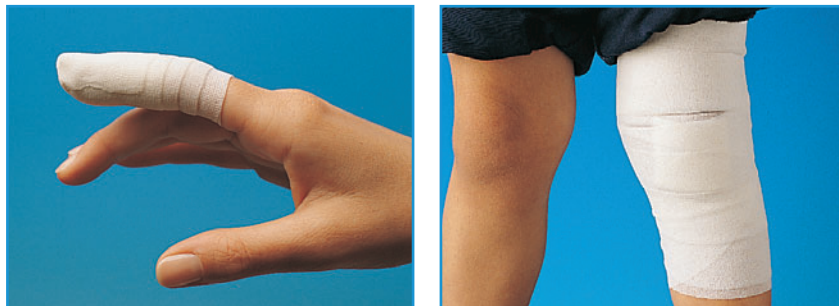

DESCRIPTION

- Bande tissée élastique en longueur enduite de fines particules de latex : Polyamide 40 %, viscosse 60 %.

PROPRIETES

- Extensibilité > ou = 55 %/m².
- Grammage moyen au repos: 55 g/m².
- Grammage moyen bande étirée: 35 g/m².
- Auto-adhésive : ne nécessite pas d'attache - n'adhère ni aux poils, ni à la peau.
- Confortable : la structure fine et légère de la bande permet le port habituel de chaussures, gants ou autre, d'autant que son contact est doux, dû à sa matière souple et extensible.
- Lisières découpées qui évitent les effets de strictions.
- Repositionnable.
- Bonne tolérance cutanée.
- Radiotransparence.

INDICATIONS

INDICATIONS :

- TRAUMATOLOGIE : . Maintien d'attelles.
. Maintien léger des masses musculaires tendineuses et ligamentaires fragilisées.
- SOIN : . Fixation de pansements (tête, thorax, articulations, pansements gras).
. Fixation de tubulures.
- Point de compression en exploration fonctionnelle.
- Pédiatrie.
- Chirurgie de la main et du pied.
- Douleurs liées à l'arthrose.

CONTRE-INDICATION :

- Allergie au latex.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler 20 à 30 cm de bande de façon à enrouler la partie du corps à protéger et relâcher la tension de la bande.
2. Poser le premier tour de bande, puis continuer le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins la moitié du tour précédent.
3. Afin d'assurer une bonne tenue le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais recouvrir complètement le tour précédent.
4. Terminer le bandage en pressant l'extrémité de la bande avec la paume de la main pendant quelques secondes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée. Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande.
- Poser la bande sans trop l'étirer, extensibilité de la bande ≥ 90%, jamais à sa tension maximale.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière et de la chaleur.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.

