

Nylexogrip®



Bande élastique cohésive de contention

Nylexogrip®

Bande sous film imprimé.
Longueur étirée : 4 mètres. Coloris : blanc.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE EN UCD
0927	4 m x 2,5 cm	50
0928	4 m x 5 cm	50
0929	4 m x 7 cm	50
0930	4 m x 10 cm	25
0931	4 m x 15 cm	25

Longueur étirée : 6 mètres. Coloris : jean.

0985	6 m x 7 cm	36
------	------------	----



Nylexogrip®



DESCRIPTION

- Bande tissée élastique en longueur enduite de fines particules de latex : . Viscose 46 %, Coton 45 %, Elasthane 9 %

PROPRIETES

- Force de contention 1 (20 à 45 cN/cm à 30 % d'allongement).
- Extensibilité en longueur ≥ 120 %.
- Grammage moyen au repos : 290 g/m².
- Grammage moyen bande étirée : 130 g/m².
- Cohésive : la bande adhère uniquement sur elle-même, pas sur la peau, ni sur les poils.
- Facile à utiliser : se découpe à la main.
- Confortable : le confort du patient est augmenté par l'aération de la bande.
- Résistante à l'eau : la bande peut être lavée 1 à 2 fois.
- Bonne Tolérance cutanée.
- Tenue à la stérilisation vapeur : . 120° C - 20 min
. 134° C - 18 min
Retirer préalablement l'emballage et le tube, plier la bande en accordéon.
- Radiotransparence.

INDICATIONS

INDICATIONS : Bande de contention et de maintien de pansements.

- **TRAUMATOLOGIE SPORTIVE :** - En prévention des accidents type entorse, luxation et subluxation - En traitement des pathologies type élongation et claquage - Pour protéger les zones de friction.
 - **PHLÉBOLOGIE :** - Contention dans la prévention et le traitement des varices essentielles ou post-phlébitiques, des ulcères variqueux des hypodermes aiguës ou subaiguës - Réduction et stabilisation de l'œdème d'origine veineuse, de lymphoedèmes - Contention dans la prévention de la maladie thromboembolique et des thrombophlébites - Contention après stripping ou sclérose.
 - **SOINS :** maintien de pansements.
- CONTRE-INDICATIONS :**
- Allergie au latex.
 - Artérite des membres inférieurs stage III et IV.
 - Microangiopathie diabétique évoluée.
 - Entorse de stades III et IV.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler 20 à 30 cm de bande de façon à enrouler la partie du corps à protéger et relâcher la tension de la bande.
2. Poser le premier tour de bande, puis continuer le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins la moitié du tour précédent.
3. Afin d'assurer une bonne tenue de la bande, le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais recouvrir complètement le tour précédent.
4. Terminer le bandage en pressant l'extrémité de la bande avec la paume de la main pendant quelques secondes.
5. le dernier tour de bandage doit être posé SANS TENSION.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée. Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande.
- Lors de la pose, le gaufrage doit toujours rester apparent, garantissant ainsi une application sûre.
- En phlébologie, la bande doit être posée avant le lever - à partir des orteils, en remontant sur la jambe - et conservée jusqu'au coucher.
- En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver à la main ou en machine dans une eau à 30°C maximum, sans détergent et sans chlore.
- Rincer et laisser sécher à plat.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la chaleur et de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

