

Optiskin®



Pansement transparent semi-perméable stérile

Optiskin®

Pansement transparent stérile sous emballage individuel stérile conditionné en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION compresse	GROUPAGE	
			UCD	boîtes/CA
2622	5,3 cm x 7 cm	2,9 x 3,5	50	30
2623	10 cm x 7 cm	7 x 3,5	50	18
2625	10 cm x 9 cm	7 x 4,5	50	16
2627	15 cm x 9 cm	11,5 x 4,5	20	16
4105	20 cm x 9 cm	15,8 x 4,5	20	16
2628	25 cm x 9 cm	19,4 x 4,5	20	16
4106	30 cm x 9 cm	23 x 4,5	20	12

Optiskin®



DESCRIPTION

COMPOSITION :

- **Optiskin®** est un pansement adhésif semi-perméable stérile, composé d'un film mince de polyuréthane, enduit d'une masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée, et d'une compresse absorbante non tissée, recouverte d'une voile protecteur anti-adhérent en polyéthylène. La masse adhésive est protégée par 2 ailettes de préhension, et le pansement est recouvert d'un film en polypropylène transparent qui facilite l'application.
- **PRÉSENTATION** : Sous sachet individuel pelable.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

PROPRIETES

- Imperméable aux bactéries, il élimine les risques de contaminations extérieures.
- Semi perméable, il respecte les échanges gazeux et de vapeur d'eau, évite ainsi les risques de macération.
- Imperméable à l'eau il autorise la prise de bains ou douches.
- Souple et confortable, il s'adapte à toutes les zones du corps, et respecte les mouvements.
- Hypoallergénique, il respecte les peaux sensibles.
- Efficace, son fort pouvoir adhésif lui permet de rester en place jusqu'à 7 jours.
- Fiable, facile à poser, son système d'application permet une pose facile précise rapide et sans tension.
- Indolore au retrait, la technique de retrait par étirement permet des poses répétées, et respecte l'épiderme.

INDICATIONS

- **Optiskin®** est un pansement destiné au recouvrement → de tout type de plaies superficielles : plaies suturées
dermabrasion
→ ou de dispositifs (sondes, drains etc...).
- Parce qu'il autorise bains et douches, **Optiskin®** est particulièrement adapté aux soins en balnéothérapie, ou de façon générale, pour une reprise rapide de l'activité après chirurgie.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- **1 - Préparation du soin** : - Se laver soigneusement les mains. - Mettre au besoin des gants.
- **2 - Préparation de la peau** : - Si nécessaire, supprimer les poils afin d'assurer une bonne adhésion du pansement en utilisant une tondeuse chirurgicale. - Procéder au besoin à l'hémostase de la plaie. - Désinfecter largement la plaie. - Sécher soigneusement.
- **3 - Application du pansement** : - Saisir les protecteurs papier entre le pouce et l'index, et dégager délicatement la surface adhésive du pansement en tirant de chaque côté. - Appliquer en le centrant, le pansement sur la plaie à protéger ou le dispositif à maintenir, avant d'avoir retiré entièrement les protecteurs papier. - Exercer une légère pression sur toute la surface afin de faire adhérer le pansement. - Retirer le film protecteur transparent à partir de la fente centrale. - Lisser le pansement de l'intérieur vers l'extérieur.
- **4 - Retrait du pansement** : - Procéder au retrait du film en pratiquant des étirements successifs : sur les bords opposés, sur un seul bord, en maintenant le reste du pansement avec l'autre main. Cette technique facilite le retrait en douceur, et sans douleur, et limite le risque d'irritation cutanée liée au changement fréquent du pansement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel de stérilité avant usage.
- Eviter les tensions à la pose.
- Ne pas utiliser le film sur les plaies ou les points de ponction infectés, les plaies saignantes ou très exsudatives.
- Surveiller régulièrement la plaie ou le point de ponction et les zones avoisinantes, afin de détecter d'éventuels signes d'infections comme une douleur, une rougeur, un œdème, une odeur ou une suppuration inhabituelle.
- Usage unique - Ne pas restériliser.

CONSEILS DE STOCKAGE

- Conserver **Optiskin®** à température ambiante. Ne pas exposer de manière prolongée à la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).