

# Urgo hydrogel®



Hydrogel pour la détersion des plaies  
nécrotiques sèches


## Urgo hydrogel®

Tubes unidoses stériles conditionnés en boîte

CODE	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
		UCD	boîte
1545	10 tubes de 15 grammes	100	10



# Urgo hydrogel®

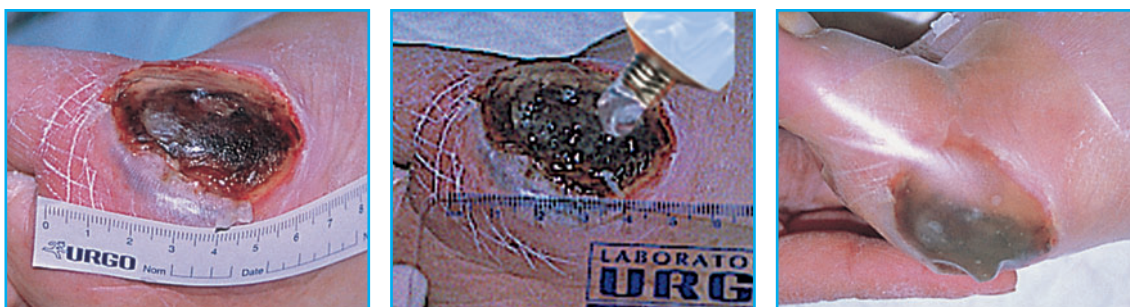

## DESCRIPTION

**COMPOSITION :** Gel stérile amorphe, clair et visqueux, constitué d'un polymère d'origine naturelle, polysaccharidique, dispersé en phase aqueuse.

- Gomme de Guar (galactomannane hautement hydrophile).
- Propylène Glycol (agent humectant).
- Eau purifiée (80 %).

**PRESENTATION :** Tubes unitaires stériles de 15 g de gel, à usage unique.

**MODE DE STERILISATION :** Par Autoclavage.

## PROPRIETES

- **Urgo hydrogel®** est un gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches nécessitant un ramollissement continu pour accélérer le processus naturel de détersion autolytique.
- Au contact de la plaque de nécrose, **Urgo hydrogel®** se comporte comme un donneur d'eau depuis sa matrice polysaccharidique vers le tissu nécrosé.
- L'utilisation d'**Urgo hydrogel®** sous pansement occlusif (Algoplaque Film®) évite au gel de se déshydrater en superficie et renforce ses propriétés hydratantes.
- Grâce à sa haute viscosité (> 100 000 centipoises), **Urgo hydrogel®** reste cohésif lors de son application et ne coule pas, même sur plaie déclive.

## INDICATIONS

- Plaque de nécrose sèche.
- Débris fibrino-nécrotiques adhérents.
- Plaies atones sèches en attente de bourgeonnement.

## CONSEILS D'UTILISATION

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- L'apparition ou la suspicion d'une surinfection sous la plaque de nécrose contre-indique la poursuite du traitement sous pansement occlusif.
- L'élimination progressive des déchets nécrotiques s'accompagne d'une augmentation de la plaie en profondeur. Ce phénomène est normal jusqu'à totale disparition de la nécrose.

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer **Urgo hydrogel®** sur toute la surface de la plaie d'une fine couche de 4-5 mm d'épaisseur en veillant à ce que le gel ne déborde pas en peau saine.
- Recouvrir d'un pansement secondaire Algoplaque Film® avec un débord de 3 à 4 cm de chaque côté.
- Renouveler l'application tous les trois jours en moyenne après ablation des débris nécrotiques ramollis.

## STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

