

URGOK2



Systeme de compression multicouches multi-composants bi-bandes étalonné

URGOK2

CODE	DIMENSIONS
191581	18-25 cm UrgoKTech 10 cm x 6 m UrgoKPress 10 cm x 7,5 cm
191583	25-32 cm UrgoKTech 10 cm x 7,3 m UrgoKPress 10 cm x 10,5 m



URGOK2



DESCRIPTION

Le système de compression **URGOK2** se compose de deux bandes actives distinctes et complémentaires :

■ UργοKTech (la 1^{ère} couche)

UργοKTech, la 1^{ère} bande à appliquer sur la jambe, est un complexage d'une ouate à un tissu compressif moyennement élastique.

- Composition :
 - ouate : viscose, polyester,
 - tissu compressif moyennement élastique : polyamide, élasthanne.
- Extensibilité à T0 : environ 75 % (bande de type allongement court)
- Bande de couleur blanche.

■ UργοKPress (la 2^{ème} couche)

UργοKPress, la seconde bande, à appliquer au-dessus d'**UργοKTech**, est une bande élastique cohésive.

- Composition : acrylique, polyamide, élasthanne.
- Extensibilité à T0 : environ 160 %.
- Bande de couleur chair qui contient du latex naturel.

PROPRIETES / INDICATIONS

URGOK2 est un système de compression bi-couche innovant, conçu pour apporter une pression de l'ordre de 40mmHg à la cheville, de façon stable avec une bonne répartition des pressions le long de la jambe grâce à 2 bandes dynamiques. **URGOK2** dispense une pression thérapeutique adaptée au traitement de l'**ulcère veineux de jambe** et la réduction des œdèmes de l'insuffisance veineuse associés. Quelle que soit la morphologie de la jambe, **URGOK2** délivre le **bon niveau de pression** dès la 1^{ère} application.

Les deux bandes qui constituent le système **URGOK2** sont conçues pour être portées jour et nuit pendant toute la période qui sépare deux changements de pansements locaux.

CARACTERISTIQUE : ETALONNAGE


Les deux bandes **UργοKTech** et **UργοKPress** comportent un étalonnage (indicateur de pression) destiné à faciliter leur application et assurer le bon niveau de pression, dès la première pose, sans entraînement préalable.

Le système d'étalonnage permet d'obtenir :

- la bonne tension de la bande,
- le bon recouvrement des spires.

La pression thérapeutique optimale de **URGO K2** est aux alentours de 40 mmHg ; elle est atteinte lorsque :

- l'étirement de la bande est tel que les ellipses imprimées sur les bandes deviennent des cercles.

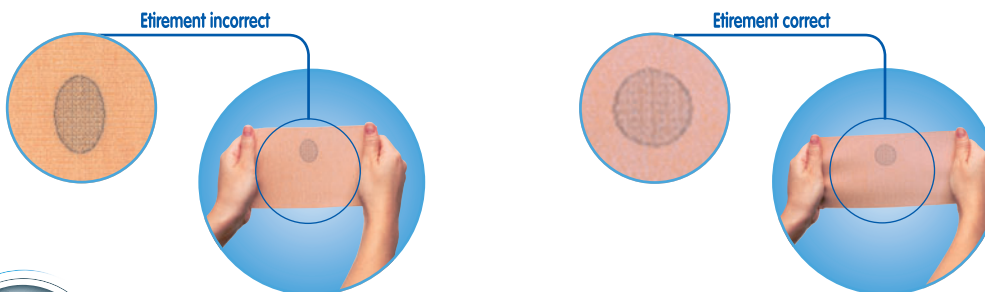

Le pourcentage de recouvrement des spires est tel que la marque d'étalonnage est tout juste masquée par la spire suivante.

La Technologie PresSure System garantit le niveau de pression thérapeutique dès la 1^{ère} pose des bandes pour un maximum d'efficacité, de sécurité et de confort quelle que soit la taille de la cheville.

Exclusivité URGOMEDICAL



L'étalonnage permet d'obtenir facilement et simplement le bon niveau de pression dès la 1^{ère} pose.



INDICATIONS

URGOK2 est indiqué pour le traitement de l'ulcère veineux de jambe et la réduction des œdèmes de l'insuffisance veineuse associés.

MÉCANISME D'ACTION

URGOK2 est un système de compression composé de 2 bandes dynamiques destinées à être utilisées ensemble.

■ **UrgoKTech**, la 1^{ère} bande, conçue pour être en contact direct avec la peau, crée une pression moyenne au repos qui augmente lors de la marche. Ce mécanisme d'action lui permet de masser efficacement le muscle de la jambe et de renforcer l'efficacité de la pompe musculaire du mollet sur le débit veineux superficiel et profond. De plus, grâce à sa couche de ouate, cette bande répartit uniformément par captonage la pression sur toute la surface de la jambe afin qu'il n'y ait pas de zones de surpression ou de sous-pression (pouvant entraîner des lésions cutanées).

Enfin, en cas de plaie fortement exsudative, **UrgoKTech** permet également d'absorber les suintements.

- **UrgoKPress**, la 2^{ème} bande, apporte la pression additionnelle à **UrgoKTech** pour atteindre le niveau de pression requis dans le traitement des ulcères veineux et maintient en place le système **URGOK2** jour et nuit jusqu'au prochain changement de pansement.

URGOK2 combine les propriétés des 2 bandes et constitue un système de compression bi-couche innovant permettant de garantir :

- La pression thérapeutique nécessaire au traitement efficace des ulcères veineux de jambe et ce, quelle que soit la taille de la cheville, grâce aux différents kits proposés suivant la circonférence de cheville.
- Le maintien de ce niveau de pression jour et nuit jusqu'à 7 jours si besoin.
- Un effet de massage significatif à la marche grâce à une pression modérée au repos et une pression forte à la marche.
- Le juste niveau de pression dès la première application, sans entraînement préalable grâce à l'étalonnage.
- Une efficacité démontrée cliniquement sur la cicatrisation des ulcères de jambe.
- Une réduction démontrée de l'œdème associé.
- Un bon niveau de confort, de jour comme de nuit permettant une amélioration de la qualité de vie.

CONSEILS D'UTILISATION

Avant de poser les bandes :

- Examiner la forme de la jambe afin de repérer d'éventuelles zones de surpression (saillies osseuses) et les protéger au besoin.
- Mesurer la circonférence de la cheville et vérifier que le bon kit a été choisi (18-25 ou 25-32 cm).
- En cas de plaie, appliquer un pansement adapté.
- Tenir le pied à 90°.
- Le système de compression **URGOK2** doit être posé de préférence le matin au lever ou bien après avoir surélevé les jambes du patient pendant une heure, afin de minimiser l'œdème orthostatique.

Circonférences de cheville de 18 à 25 cm :

■ Application de UrgoKTech :

1. Appliquer **UrgoKTech** à la base des orteils en faisant un tour d'ancrage sans étirer. Le motif d'étalonnage doit se situer vers le haut de la jambe.
2. Continuer en faisant une figure en "8" autour de la cheville en étirant la bande jusqu'à ce que l'**ellipse devienne un cercle**. Veillez à bien recouvrir le talon.
3. Remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales avec un **recouvrement à 50%**, tel que le motif de l'étalonnage de la spire précédente soit tout juste recouvert par la couche suivante, et toujours en étirant jusqu'à ce que l'**ellipse devienne un cercle**.
4. Finir un doigt sous le genou, couper l'excédent de bande éventuel et sécuriser avec un sparadrap.

■ Application de UrgoKPress :

Appliquer **UrgoKPress** par-dessus **UrgoKTech** selon la même technique en commençant un doigt au-dessus de **UrgoKTech** et en finissant un doigt sous **UrgoKTech** afin que seul **UrgoKTech** soit en contact direct avec la peau.

Couper l'excédent de bande éventuel et appliquer une légère pression de massage avec les mains sur **UrgoKPress** tout le long de la jambe pour assurer une bonne adhérence de la bande sur elle-même et donc une bonne tenue du système.



Circonférences de cheville de 25 à 32 cm :

Suivre les mêmes instructions que celles données ci-dessus pour les chevilles de circonférence 18-25cm, en utilisant le kit 25-32 cm.

Le motif d'étalonnage se situant au milieu de la largeur de la bande, les spirales sont effectuées avec un **recouvrement au 2/3**, tel que le motif de l'étalonnage de la spire précédente soit tout juste recouvert par la couche suivante, et toujours en étirant jusqu'à ce que l'**ellipse devienne un cercle**.



URGO K2



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Avant de prescrire **URGOK2**, il est nécessaire de procéder à un examen par Echo-Doppler pour vérifier que l'IPS est supérieur à 0,8
- En cas de diabète, d'insuffisance cardiaque ou de microvasculopathie avancée, **URGOK2** ne doit être utilisé qu'après avis médical, sous surveillance stricte et après traitement adéquat.
- En cas de dermatose infectieuse peri-ulcéreuse, le traitement par **URGO K2** ne sera initialisé qu'après traitement de l'infection.
- En cas d'ulcère de cause rare, (vascularite, hémopathie, pyoderma gangrenosum,...) le traitement par **URGO K2** ne sera institué qu'après avis médical spécialisé.
- L'efficacité de **URGOK2** a été testée et validée pour l'application simultanée et conjointe de **UrgoKetch** et **UrgoKPress**.
- Si des difficultés surviennent, consulter votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

- La compression à haut niveau de pression est contre-indiquée chez les patients souffrant d'une pathologie artérielle (ulcère artériel ou à prédominance artérielle ; artériopathie avérée ou suspectée). **URGOK2** est déconseillé lorsque l'indice de pression systolique (IPS) mesuré par écho Doppler est inférieur à 0,8.
- Ulcère d'étiologie infectieuse.
- Patients potentiellement allergiques à l'un des composants.
- La micro-angiopathie diabétique.
- La *phlegmatia coerulea delens* (phébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- La thrombose septique.

DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE :

- Date de péremption kit **URGO K2** : 3 ans (**UrgoKTech** : pas de date de péremption, **UrgoKPress** : 3 ans)
- Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité
- Kit à usage unique

STATUT REGLEMENTAIRE

- Dispositif médical marqué CE.

